

KOYO オムツのつけ方

両面吸収パッドの使い方

女性の場合



1.
4つ位のジャバラを作ります。



2.
尿道口にピッタリと合わせます。



3.
尿取りパッドのギャザーで包むようにしてあてます。



4.
最後に全体を軽く握るよう
にして完成。

男性の場合①



1.
三角に折り、コップ状にします。



2.
ペニスに装着します。



3.
その上から、尿とりパッドを三角に巻いていきます。



男性の場合②(巻きづらい場合)



1.
両端から丸めていきます。



2.
中央の溝でペニスを挟みこ
みます。



3.
尿取りパッドのギャザーで包むようにしてあてます。

