


# KOYO オムツのつけ方

## テープ止めタイプとレギュラーパッドの組み合わせ (かもめ+尿取りパッドマリン)

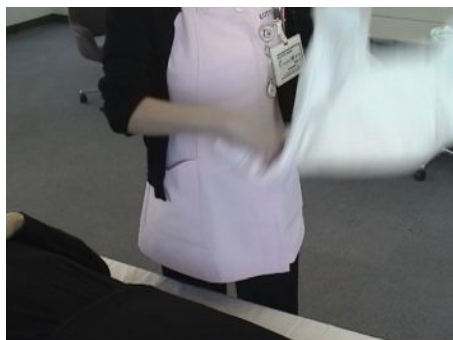

1.  
おむつをバサッと振ったりして  
衝撃を与えてはいけません。



2.  
おむつを縦にしっかりと引っ張  
るとギャザーが立ちます。



3.  
おむつの上にパッドを広げ、必  
ずギャザーを指で沿わせませす。



4.  
沿わすことでギャザーがしっか  
り立ちます。




5.  
おむつのセンターラインと背骨  
がまっすぐに合うようにします。



6.  
反対側のおむつもシワができ  
ないように広げます。



7.  
脚は必ずまっすぐにします。

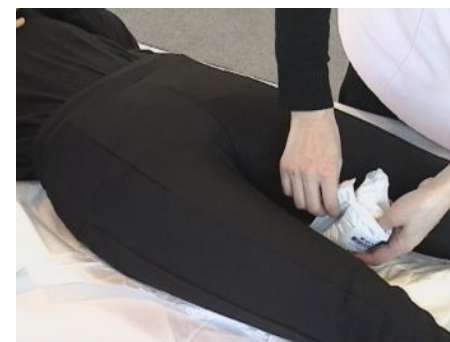

8.  
パッドを半分に折るようにして股  
の間に入れていきます。



9.  
横に開くように広げます。




10.  
お尻を良く動かす方の場合は、テープをお尻側にして固定します。



11.  
おむつは少し下へ引っ張り、お尻のしわを伸ばします。



12.  
股の間にしっかりはいるようにあてます。

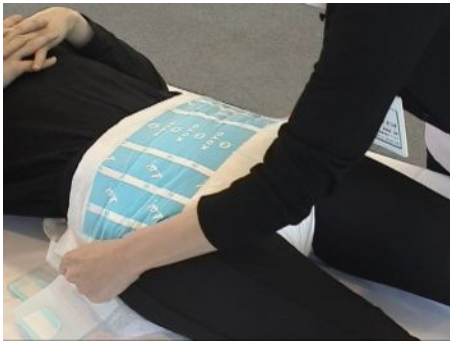

13.  
おむつも上に引き上げるのではなく、横に広げてあてます。



14.  
必ず、下のテープからつけています。



15.  
反対側も、きちんと引っ張って下のテープからつけます。



16.  
上のテープは少し引っ張って斜め下につけます。



17.  
手のひらが入るくらいの余裕があるのが理想です。