

KOYO オムツのつけ方

両面吸収パッドの使い方 (尿量が多い・そけい部からモれる場合) (さらさらスリム)


女性の場合



1. 4つ位のジャバラを作ります。



2. 尿道口にピッタリと合わせます。

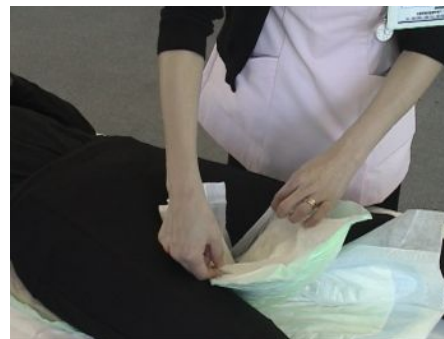

3. パッドのギャザーで包むようにしてあてます。



4. パッドを横に広げるようにあて、おむつをあてて完成です。

男性の場合



1. 三角に折り、コップ状にします。



2. ペニスに装着します。



3. その上から、パッドを三角に巻いていきます。



4. この状態におむつをあてて完成です。